

GUÍA RÁPIDA DE Symphony® PLUS de Medela

Programa INITIATE

INICIO DE LA LACTANCIA

después del parto



8-12 veces en 24 h

Sesión de extracción ≈ 15 minutos

Fases de estimulación, fases de extracción y pausas

1



Una vez que se extraigan al menos 20 ml o más en tres sesiones de extracción **consecutivas**



2



Cuando los marcadores fisiológicos de la activación secretora* se hacen visibles

*sensación de congestión mamaria (subida de la leche)

3

Día 6 o más

Cambie al programa **MAINTAIN** antes del día 6

¿Cuándo cambiar del programa **INITIATE** al programa **MAINTAIN**?

Programa MAINTAIN

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LACTANCIA

a partir del día 6



8-12 veces en 24 h

Sesión de extracción ≈ 15 min


2-Phase Expression (fase de estimulación y extracción)



Nota: Esta guía rápida no sustituye a las instrucciones de uso completas. Consulte las instrucciones de uso de Symphony para obtener más información.

Programa INITIATE

Puede saber que este programa se está ejecutando cuando se ven estos símbolos en la pantalla: ●●●

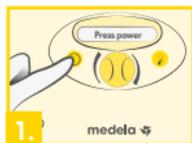

Pulsar ON



Pulse el botón «Bajada de la leche» para utilizar el programa INITIATE



Ajustar vacío



NOTA:
El programa finaliza automáticamente




https://www.medela.es/lactancia-para-profesionales/productos/extraccion/Como-usar-el-sacaleches-Symphony?utm_source=qr&utm_medium=offline&utm_campaign=symphony

Programa MAINTAIN

Puede saber que este programa se está ejecutando cuando se ven estos símbolos en la pantalla: ●●●



Pulsar ON

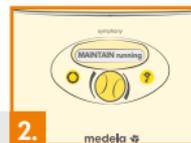

Transcurridos 10 segundos, se inicia el programa MAINTAIN



Establezca un nivel de vacío. Transcurridos 2 minutos, el sistema pasa automáticamente a la fase de extracción (4.)



Si la leche empieza a fluir antes de que hayan transcurrido los dos minutos, pulse el botón «Bajada de la leche» para cambiar directamente al modo de extracción (4.).



Restablecer vacío



NOTA:
El programa no finaliza automáticamente



https://www.medela.es/lactancia-para-profesionales/productos/extraccion/Como-usar-el-sacaleches-Symphony?utm_source=qr&utm_medium=offline&utm_campaign=symphony



IMPORTANTE: ESTABLEZCA EL VACÍO CORRECTAMENTE Y COMPRUEBE/AJUSTE SI FUERA NECESARIO

Utilice siempre el nivel de vacío máximo que resulte cómodo. Esto ayuda a producir un flujo de leche óptimo y hace que la extracción sea más eficaz.