

TIRE-LAIT Symphony® PLUS de Medela – GUIDE RAPIDE

Programme INITIATE

INITIATION DE LA LACTATION:

après la naissance



8 à 12x par 24 h

Séance d'initiation ≈ 15 min

Phases de stimulation, phases d'expression et pauses

1



Une fois que vous avez exprimé au moins 20 ml de lait au cours de trois séances d'expression **consécutives**



ou

2



Lorsque vous remarquez les marqueurs physiologiques de l'activation sécrétoire*

*sensation d'engorgement des seins (montée de lait)

ou

3

Jour 6 +

Passez au **programme MAINTAIN** au plus tard le 6e jour

1



Programme MAINTAIN

AMPLIFICATION ET MAINTIEN DE LA LACTATION

dès le 6e jour



8 à 12x par 24 h

Séance d'expression ≈ 15 min


2-Phase Expression (phase de stimulation et d'expression)



Remarque : ce guide rapide ne remplace pas le mode d'emploi. Veuillez consulter le mode d'emploi du tire-lait Symphony pour plus d'informations.

Programme INITIATE

Vous pouvez voir que ce programme est en cours d'exécution grâce à ces symboles à l'écran : ●●●

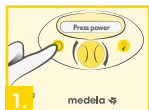

Démarrez



Appuyez sur le bouton « gouttes » pour utiliser le programme INITIATE



Choisissez la puissance d'aspiration



REMARQUE :
Le programme se termine automatiquement




youtu.be/9WK5W0R1jR8

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland

Programme MAINTAIN

Vous pouvez voir que ce programme est en cours d'exécution grâce à ces symboles à l'écran : ●●●

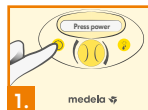

Démarrez



Choisissez la puissance d'aspiration.

2 minutes plus tard, le système bascule automatiquement en phase d'expression (4.)



Réinitialisez la puissance d'aspiration




REMARQUE :
Le programme ne se termine pas automatiquement



youtu.be/gHf1ngt6sUA



10 secondes plus tard, le programme MAINTAIN démarre

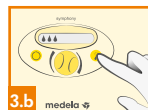

Si le lait commence à s'écouler avant que les deux minutes ne se soient écoulées, appuyez sur le bouton « gouttes » pour passer directement en mode d'expression (4.).



IMPORTANT ! RÉGLEZ CORRECTEMENT LE NIVEAU D'ASPIRATION ET VÉRIFIEZ/AJUSTEZ SI NÉCESSAIRE

Utilisez toujours le niveau de succion de confort optimal et vous offriera une expression plus efficace.

medela 
THE SCIENCE OF CARE™