

Medela Symphony® PLUS BEKNOPTE HANDLEIDING

INITIATE-programma

DE LACTATIE
INITIËREN

na de
geboorte



8–12x
in 24 u

Afkolfsessie ≈ 15 minuten
Stimulatiefasen, afkolffasen
en pauzes

1



Zodra ten minste 20 ml
is afgekolfd in drie **oopen-
volgende** afkolfsessies



of

2



Wanneer fysiologische
markers van secretoire
activatie* zichtbaar worden
*gevoel van stuwung (melkproductie komt op gang)

of

3

Dag 6 +

Schakel uiterlijk op
dag 6 over naar het
MAINTAIN-programma

Wanneer overschakelen van
INITIATE naar **MAINTAIN**?

MAINTAIN-programma

DE LACTATIE OPBOUWEN
EN OP PEIL HOUDEN

vanaf
dag 6



8–12x
in 24 u


Afkolfsessie ≥ 15 min.
2-Phase Expression
(stimulatie- en
afkolffase)



Let op: Deze beknopte handleiding is geen vervanging voor de volledige gebruiksaanwijzing.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Symphony voor meer informatie.

INITIATE-programma

Aan de volgende symbolen op het display kun je zien dat dit programma actief is: ●●●

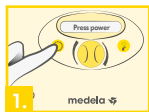

Druk op de aan-knop



Druk op de 'druppel'-toets om het **INITIATE-programma** te gebruiken



Vacuüm instellen




LET OP: Programma eindigt automatisch



MAINTAIN-programma

Aan de volgende symbolen op het display kun je zien dat dit programma actief is: ●●●

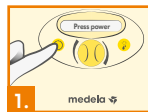

Druk op de aan-knop



Stel een vacuüm in.
Na 2 minuten schakelt het systeem automatisch over naar de afkolffase (4.)



Vacuüm opnieuw instellen



LET OP: Programma stopt niet automatisch



Na 10 seconden start het **MAINTAIN-programma**



Als de melk begint te stromen voordat de twee minuten zijn verstreken, drukt u op de 'druppel'-toets om direct over te schakelen naar de afkolffmodus (4.).



BELANGRIJK! STEL HET VACUÛM CORRECT IN EN CONTROLEER/PAS INDIEN NODIG AAN

Gebruik altijd het maximale vacuümniveau dat comfortabel is. Dit draagt bij aan een optimale melkstroom en maakt het afkolven het meest effectief.