

Guia de início rápido Symphony®

Digitalize para visitar
o **Symphony Hub** para
obter instruções e vídeos
passo a passo fáceis



Programa INITIATE



INICIAR O ALEITAMENTO

APÓS O NASCIMENTO



Sessão de extração
= 15 min

Fases de estimulação,
fases de extração
e pausas

1



Quando são extraídos **20 ml
ou mais de ambas as mamas
combinadas**, durante uma
sessão de extração

ou

2



Quando os marcadores
fisiológicos da “descida”
do leite* se tornam aparentes

*sensação de mama cheia

ou

3

Dia 6

Mude para
o **programa MANTAIN**
o mais tardar no dia 6

Quando mudar de
INITIATE para **MANTAIN**?



Programa MANTAIN

DESENVOLVER E MANTER O ALEITAMENTO



Sessão de extração
≥ 15 min

2-Phase Expression
(fase de estimulação
e extração)



Nota: Este guia rápido não substitui as instruções de utilização completas.
Para mais informação, consulte as instruções de utilização do Symphony.

Lave muito bem as mãos com água e sabão antes de tocar no extrator de leite, nos kits de extração e no peito.

Programa INITIATE

Pode perceber que este programa está a ser executado a partir destes símbolos no visor: ●●●



1. Prima o botão ligar/desligar



2. Pressione o botão "extração" dentro de 10 segundos para usar o **programa INITIATE**



3. Regular o vácuo de conforto máximo



NOTA: O programa termina automaticamente

Programa MANTAIN

Pode perceber que este programa está a ser executado a partir destes símbolos no visor: ●●●



1. Prima o botão ligar/desligar

espere ▶



2. O **programa MANTAIN** começa automaticamente com a fase de estimulação



3. Se o leite começar a fluir antes dos dois minutos terem passado, prima o botão "extração" para mudar diretamente para a fase de extração. Após 2 minutos na fase de estimulação, o extrator muda automaticamente para a fase de extração.



4. Regular o vácuo de conforto máximo



NOTA: O programa não termina automaticamente

! **IMPORTANTE!**

Para máxima eficácia, eficiência e conforto, faça sempre extração dupla com o seu vácuo de conforto máximo e funis corretamente ajustados. Vá a www.medela.com/fittingguide para saber o tamanho do seu funil.

Ajuste o vácuo para o **vácuo de conforto máximo** rodando o botão de vácuo para a direita para aumentar a sucção até sentir um leve desconforto. Em seguida, rode para a esquerda para diminuir a sucção até ficar confortável.