

## Guía de inicio rápido del protector de calostro

### Guía paso a paso sobre cómo armar y utilizar el protector de calostro


#### Cómo armar su protector de calostro

**Piezas y características**




Tapa  
Caras sonrientes  
Orificio de ventilación  
Marcas de nivel  
Contenedor


**1**  
Acople el recolector al conector del kit del extractor de leche Symphony®.

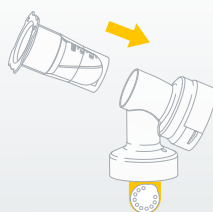

**2**  
Asegúrese de que la orientación\* sea correcta para permitir la ventilación y evitar que el calostro se derrame por el orificio de ventilación hacia el recipiente inferior.



**3**  
Coloque el embudo en la parte superior del protector de calostro.

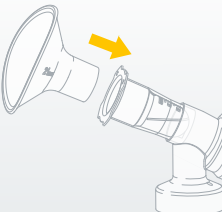


**4**  
Arme el kit del extractor de leche.



#### \*Consejos para una orientación correcta:

Asegúrese de que el lado con las caras sonrientes, el orificio de ventilación y las marcas de nivel están orientados hacia arriba ↑.

**NOTA:**  
El lado que no tiene nada debe estar orientado hacia abajo ↓.

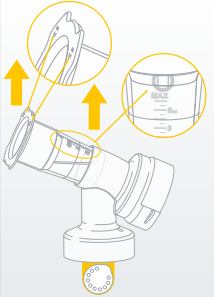


Baja visibilidad: sienta las protuberancias en la parte posterior de las caras sonrientes.



**Armado correcto**




**Armado incorrecto**




#### Cómo desarmar su protector de calostro


**1**  
Retire el protector de calostro del conector, dejando el embudo conectado.

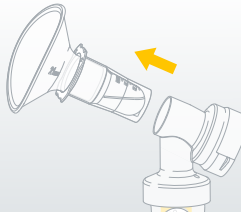

**2**  
Colóquelo sobre una superficie plana.



**3**  
Retire el embudo.




**4**  
Fije la tapa.










**Más información**

Escanee el código QR para obtener más información sobre su protector de calostro



## Lavar después de cada uso\*

Lavar en un recipiente exclusivo para esta limpieza
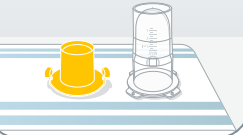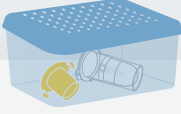
<p><b>1</b></p> <p>Enjuague las piezas con agua limpia.</p>	<p><b>2</b></p> <p>En un recipiente exclusivo para lavar estos elementos, remoje las piezas del extractor en agua jabonosa tibia durante 5 minutos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No coloque las piezas directamente en el fregadero.</li></ul>	<p><b>3</b></p> <p>Limpe con un paño limpio o un cepillo suave.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Enjuague las piezas con agua limpia.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Coloque las piezas sobre una superficie o toalla limpia y déjelas secar al aire.</p>
				
<p><b>6</b></p> <p>Almacene las piezas en un lugar limpio y fresco cuando no las use. NO guarde las piezas mojadas o húmedas.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Desechar o reciclar transcurridas las 24 horas de uso de acuerdo con la normativa local o el protocolo del hospital.</p>			
				

**\*Cuando utilice el protector de calostro con lactantes en la unidad de terapia intensiva neonatal (NICU), siga las prácticas recomendadas por la HMBANA, que recomienda utilizar un contenedor nuevo para cada sesión de extracción.†**

El aspecto del contenido puede variar.

Consulte las instrucciones de uso del producto para ver las instrucciones completas.

† Jones, F. Best Practice for Expressing, Storing, and Handling Human Milk in Hospitals, Homes, and Child Care Settings. 4th ed Fort Worth, TX: Human Milk Banking Association of North America, Inc. (2019), pág. 59

La marca denominativa y el logotipo de Medela y Symphony están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. y en la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual. Science of Care es una marca comercial de Medela. 15400113 B 0923© 2023 Medela