

Ferramenta para verificar os tamanhos dos funis da Medela

Use esta ferramenta como ponto de partida para a ajudar a encontrar o funil com o tamanho certo para si, com base no diâmetro do seu mamilo. A Medela oferece uma gama de opções e de tamanhos de funis. Um ajuste correto é essencial para uma extração confortável e eficaz, ajudando a otimizar o fluxo de leite.



* O PersonalFit Flex™ não está disponível no tamanho de 36 mm.


Como encontrar o seu ajuste ideal

Antes de iniciar uma sessão de extração, veja qual é o círculo que se ajusta melhor ao tamanho do seu mamilo (não inclua a aréola).

O tamanho correto deve permitir um ajuste preciso mas confortável em volta do seu mamilo. Não deve ser nece através do círculo.


Teste o tamanho do funil.

- Comece com o tamanho de funil que acabou de determinar ou com um que tenha vindo com o seu extrator.
- Centre o mamilo e segure o funil cuidadosamente contra a mama.
- Ajuste o nível de vácuo de máximo conforto (Maximum Comfort Vacuum) para alcançar um nível de sucção ótimo.
- Consulte as imagens seguintes que mostram a fase de extração (após a fase de estimulação).

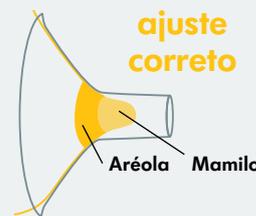


- O mamilo está centrado e move-se livremente.

demasiado pequeno

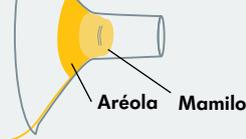

- O mamilo roça na parede do canal.
- Experimente um tamanho acima.

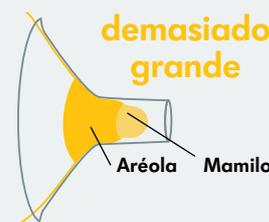

demasiado grande

- O mamilo e uma porção excessiva da aréola são puxados para dentro do canal.
- Experimente um tamanho abaixo.

Sabia que?

- Poderá precisar de um tamanho diferente para cada mama.
- O tamanho do funil correto dependerá do tecido da mama e da elasticidade da sua pele.
- O tamanho do funil pode mudar ao longo do tempo, durante a sua experiência de extração.
- Comprimir demasiado o funil pode bloquear os canais de leite.

Motivos para experimentar outro tamanho

- O seu mamilo roça nas paredes laterais do canal, causando desconforto?
- Observa uma porção excessiva da aréola a ser puxada para dentro do canal?
- Observa alguma vermelhidão e/ou zona esbranquiçada?
- Sente que ficou leite por extrair no final da extração?

Se respondeu “SIM” a alguma destas perguntas, considere experimentar outro tamanho. Se continua insegura quanto ao tamanho correto, consulte uma consultora em aleitamento ou especialista em amamentação.

Veja a nossa animação sobre o ajuste dos funis em medela.pt/guidadetamanhos