

# Medela Symphony® PLUS: КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Программа INITIATE (Запуск)

ЗАПУСК ЛАКТАЦИИ

после родов

8-12 раз за 24 часа

Сцеживание ≈ 15 мин.  
Фазы стимуляции, фазы сцеживания и перерывы

Когда переходить с программы **INITIATE (Запуск)** на **MAINTAIN (Поддержание)**?

1



Когда во время каждого из трех **последовательных** сцеживаний удалось получить как минимум 20 мл молока или более.



или

2



Когда становятся заметны физиологические показатели секреторной активации\*  
\* Ощущение набухания молочных желез («приход» молока)

или

3

День 6 и далее

**Переходите** на программу **MAINTAIN (Поддержание)** не позднее чем в 6-й день

## Программа MAINTAIN (Поддержание)

УВЕЛИЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЛАКТАЦИИ

С 6-го дня

8-12 раз за 24 часа

Сцеживание ≥ 15 мин.  
Технология 2-Phase Expression (фазы стимуляции и сцеживания)

 Примечание. Данное краткое руководство не заменяет полную инструкцию по применению. Дополнительная информация представлена в инструкции по применению молокоотсоса Symphony.

## Программа INITIATE (Запуск)

Появление этих символов на дисплее покажет, что программа запущена:



Нажмите кнопку включения.



Нажмите кнопку «Сцеживание» для использования программы INITIATE (Запуск).



Настройте уровень вакуума.



**ПРИМЕЧАНИЕ.**  
Программа завершается автоматически.


ПРОГРАММА INITIATE (ЗАПУСК)



[youtu.be/8riEuEAWTU](https://youtu.be/8riEuEAWTU)

## Программа MAINTAIN (Поддержка)

Появление этих символов на дисплее покажет, что программа запущена:

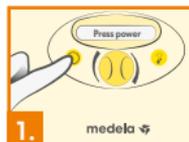

Нажмите кнопку включения.



Программа MAINTAIN (Поддержка) запустится через 10 секунд.



Настройте уровень вакуума. Через 2 минуты система автоматически переключится на фазу сцеживания (4).

— ИЛИ —



Если молоко начнет выделяться до истечения двух минут, нажмите кнопку «Сцеживание», чтобы переключить молокоотсос непосредственно в фазу сцеживания (4).



Заново настройте уровень вакуума.



**ПРИМЕЧАНИЕ.**  
Программа не завершается автоматически.

ПРОГРАММА MAINTAIN (ПОДДЕРЖАНИЕ)



[youtu.be/Xve8NQH-1Zg](https://youtu.be/Xve8NQH-1Zg)



**ВАЖНО! ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЕ УРОВЕНЬ ВАКУУМА И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕРЯЙТЕ И (ИЛИ) РЕГУЛИРУЙТЕ ЕГО**

Всегда устанавливайте максимальный уровень вакуума в зоне комфорта. Это помогает обеспечить приток молока и наиболее полное сцеживание.