

Thopaz+™ Quick Card




La presente Quick Card non sostituisce le normali istruzioni per l'uso. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso di Thopaz+ per informazioni più dettagliate. Questa Quick Card si riferisce al firmware 1.01.


1. Montaggio



1. Aprire l'imballaggio del tubicino sterile
2. Conservare il connettore paziente nella sacca interna

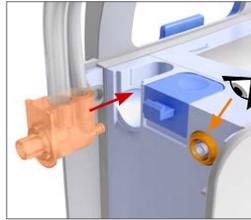

3. Verificare la presenza della guarnizione arancione
4. Collegare il tubicino

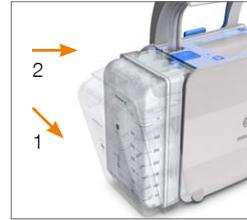


5. Inserire innanzitutto il fondo del contenitore
6. Far scattare in posizione la parte superiore del contenitore



7. Il sistema Thopaz+ è collegato e pronto per l'accensione

2. Accensione

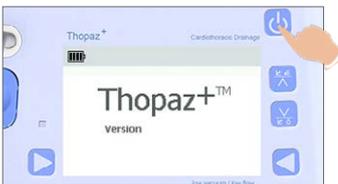

1. Accendere Thopaz+
2. Verificare se è stato collegato un nuovo paziente



3. Verificare la dimensione del contenitore rilevato (rilevamento errato: scartare il contenitore)
4. Thopaz+ è pronto per il controllo funzionale

3. Esecuzione del controllo funzionale



1. Sigillare il tubicino (mantenere la sterilità)



2. Premere "OK"
Test superato: continuare
Test non riuscito: seguire le indicazioni delle istruzioni per l'uso



3. Collegare il sistema Thopaz+ al paziente secondo le linee guida dell'ospedale
4. Premere "Accesso" per iniziare la terapia

4. Regolazione della pressione durante il funzionamento



1. Premere contemporaneamente



2. Impostare la pressione desiderata



3. Confermare con "OK"

5. Controllo dell'andamento della terapia



1. Controllare la cronologia della perdita d'aria



2. Passare ai grafici successivi sulla perdita d'aria premento "Avanti"




3. Controllare la cronologia del liquido




4. Passare ai grafici successivi sul liquido premento "Avanti"

6. Azzeramento del display del liquido

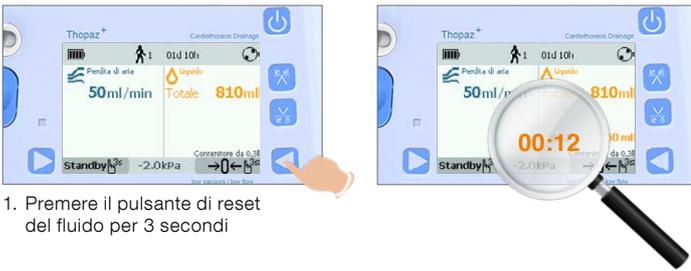


1. Premere il pulsante di reset del fluido per 3 secondi
2. Il timer indica il tempo trascorso dall'ultimo azzeramento del parametro. Se necessario, è possibile azzerarlo nuovamente tenendo premuto per 3 secondi il tasto della cronologia del liquido.

7. Sostituzione del contenitore

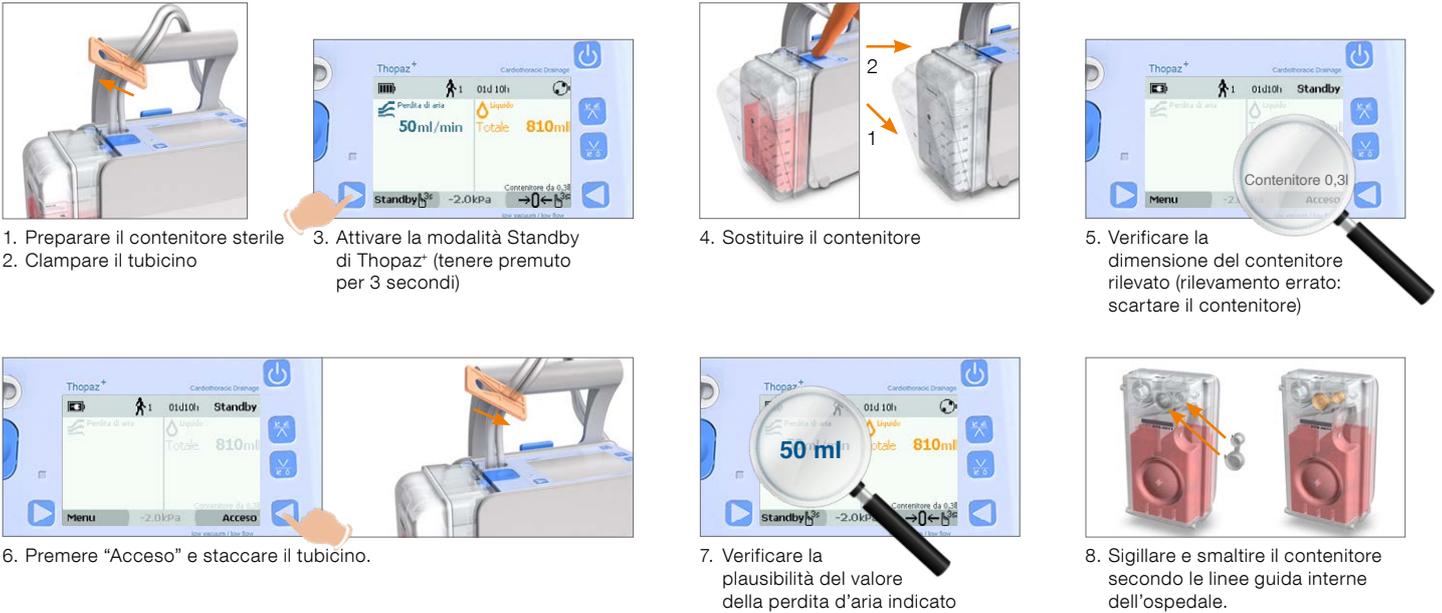

1. Preparare il contenitore sterile
2. Clampare il tubicino
3. Attivare la modalità Standby di Thopaz⁺ (tenere premuto per 3 secondi)
4. Sostituire il contenitore
5. Verificare la dimensione del contenitore rilevato (rilevamento errato: scartare il contenitore)
6. Premere "Accesso" e staccare il tubicino.
7. Verificare la plausibilità del valore della perdita d'aria indicato
8. Sigillare e smaltire il contenitore secondo le linee guida interne dell'ospedale.

8. Segnali di informazione

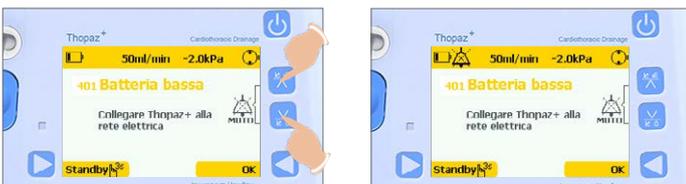

1. Premere contemporaneamente per silenziare il segnale di informazione
2. Seguire le indicazioni sullo schermo

10. Spegnimento di Thopaz⁺



1. Clampare il catetere
2. Clampare il tubicino
3. Attivare la modalità Standby di Thopaz⁺ (tenere premuto per 3 secondi)
4. Spegner Thopaz⁺
5. Rimuovere e sigillare il contenitore
6. Smaltire il contenitore e il tubicino secondo le linee guida interne dell'ospedale
7. Pulire e disinfettare Thopaz⁺ secondo le istruzioni per l'uso

9. Verifica del catetere

 Usare solo con un catetere del paziente (drenaggio) nello spazio interpleurico.



1. Aprire la cronologia della perdita d'aria
Avvertenza: la verifica del catetere è attiva soltanto se la perdita d'aria è 0 ml/min
2. Passare alla pagina 4/4 premendo "Avanti"
3. Seguire le istruzioni sul display

