

Thopaz+™ Quick Card




Este Quick Card não substitui as instruções de utilização regulares. Consulte as instruções de utilização do Thopaz+ para ver informação mais detalhada. Este Quick Card refere-se ao firmware 1.01.



1. Montagem



1. Abra a embalagem da tubagem estéril
2. Conserve o conector ao paciente no saco interior

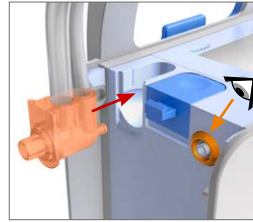

3. Verifique a presença do selo cor de laranja
4. Fixe a tubagem

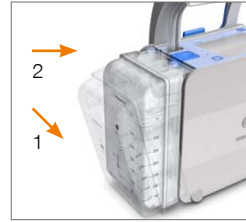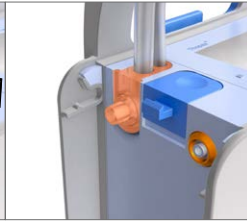

5. Insira primeiro a parte de baixo do recipiente
6. Encaixe a parte de cima do recipiente no lugar




7. O sistema Thopaz+ está conectado e pronto para ligar

2. Ligar




1. Ligue o Thopaz+
2. Confirme se um novo paciente está ligado ou não

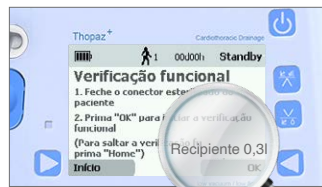


3. Verifique o tamanho do recipiente detetado (Deteção errada: eliminar o recipiente)
4. O Thopaz+ está pronto para a verificação funcional

3. Realizar verificação funcional

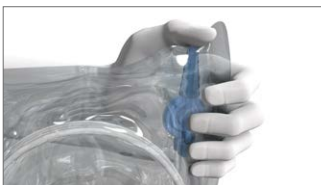

1. Vede a tubagem (mantenha a esterilidade)

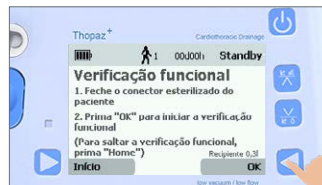

2. Prima "OK"
O teste passou: continue
O teste falhou: siga as orientações fornecidas nas instruções de utilização



3. Ligue o sistema Thopaz+ ao paciente em conformidade com as orientações hospitalares
4. Prima "Ligado" para dar início à terapia

4. Ajustar a pressão durante o funcionamento



1. Prima simultaneamente



2. Defina a pressão pretendida



3. Confirme com "OK"

5. Verificação do progresso de terapia



1. Verifique o histórico de fugas de ar



2. Navegue os gráficos de fugas de ar utilizando "Avançar"




3. Verifique o histórico de fluidos




4. Navegue os gráficos de fluidos utilizando "Avançar"

6. Repor o indicador de fluidos

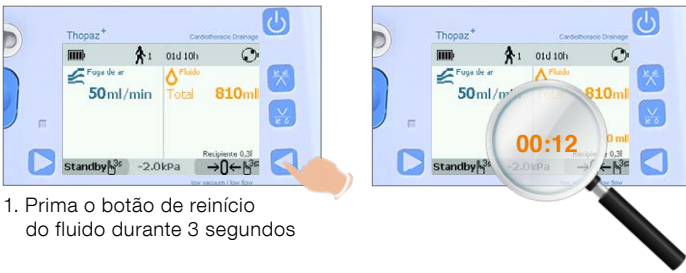


1. Prima o botão de reinício do fluido durante 3 segundos
2. O temporizador indica a última vez em que o parâmetro foi reposto a zero. O ecrã pode ser reposto a zero sempre que necessário, premindo de novo a tecla do histórico de fluidos (3 segundos).

7. Substituição do recipiente

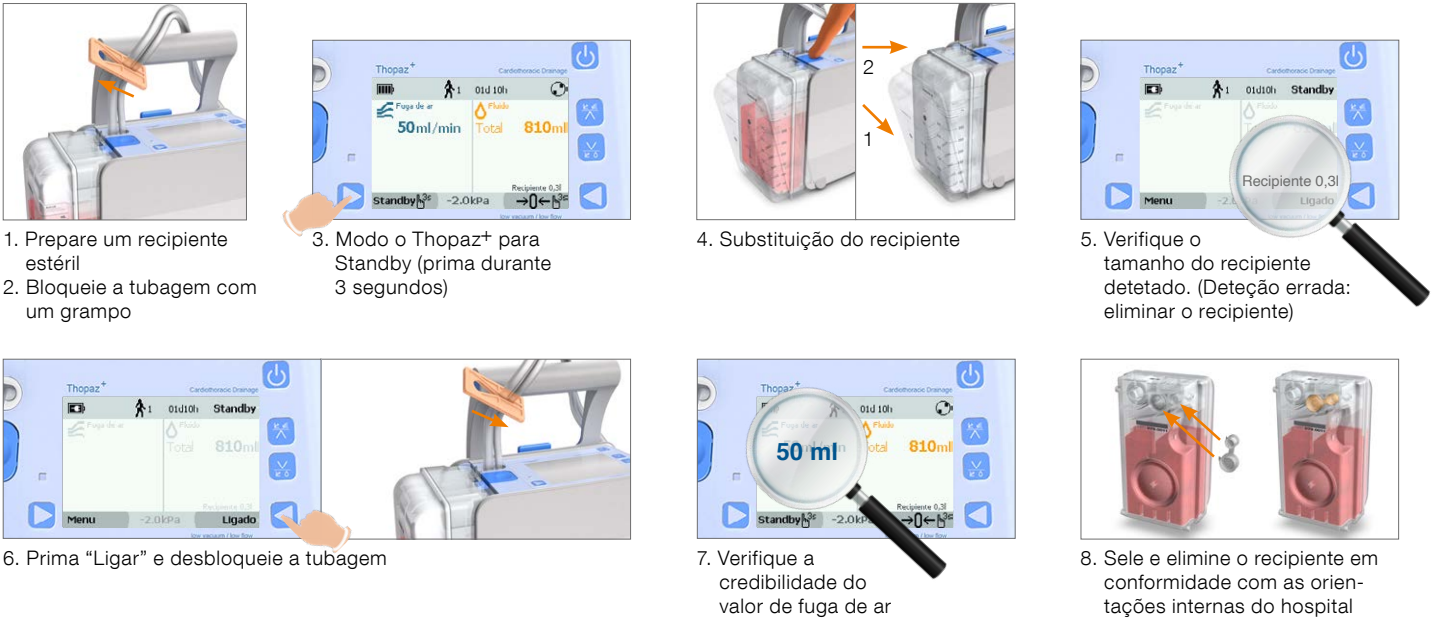


1. Prepare um recipiente estéril
2. Bloqueie a tubagem com um grampo
3. Modo o Thopaz+ para Standby (prima durante 3 segundos)
4. Substituição do recipiente
5. Verifique o tamanho do recipiente detetado. (Deteção errada: eliminar o recipiente)
6. Prima "Ligar" e desbloqueie a tubagem
7. Verifique a credibilidade do valor de fuga de ar
8. Sele e elimine o recipiente em conformidade com as orientações internas do hospital

8. Sinais de informação

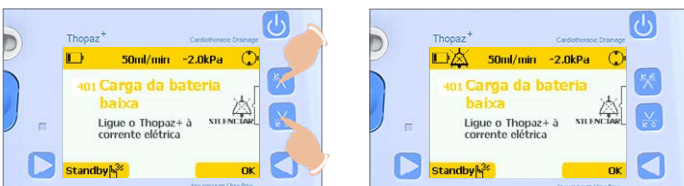


1. Prima simultaneamente para silenciar o sinal de informação
2. Siga as recomendações apresentadas no ecrã


10. Desligar o Thopaz+

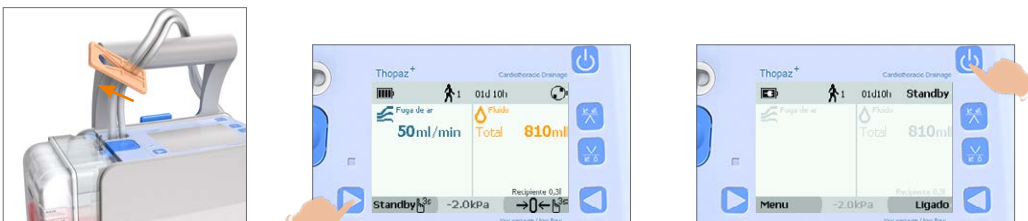

1. Bloqueie o cateter com o grampo
2. Bloqueie a tubagem com um grampo
3. Mude o Thopaz+ para Standby (prima durante 3 segundos)
4. Desligue o Thopaz+
5. Retire e sele o recipiente
6. Elimine o recipiente e a tubagem em conformidade com as orientações internas do hospital
7. Limpe e desinfete o Thopaz+ de acordo com as instruções de utilização

9. Verificação de cateter

 Utilize apenas com um cateter do paciente (dreno) colocado no espaço interpleural.

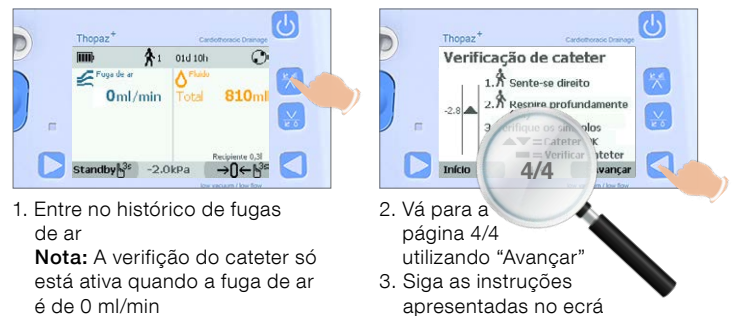

1. Entre no histórico de fugas de ar
Nota: A verificação do cateter só está ativa quando a fuga de ar é de 0 ml/min
2. Vá para a página 4/4 utilizando "Avançar"
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã

