

# Thopaz+™ Quick Card




Esta guía rápida no sustituye a las instrucciones de uso convencionales. Si desea obtener información más detallada, consulte las instrucciones de uso de Thopaz+. Esta guía rápida hace referencia al firmware 1.01.



## 1. Montaje



1. Abra el envase del tubo estéril
2. Guarde el conector del paciente en la bolsa interna

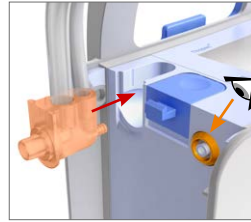

3. Compruebe que el sello naranja esté presente
4. Acople el tubo

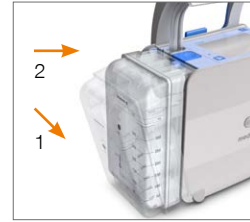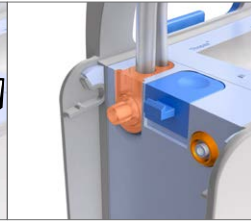

5. Introduzca primero la parte inferior del recipiente
6. Encaje la parte superior del recipiente en su lugar




7. El sistema Thopaz+ está conectado y listo para ser encendido

## 2. Encendido




1. Encienda Thopaz+
2. Confirme si hay un nuevo paciente conectado o no

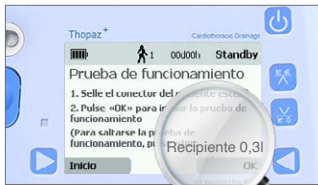


3. Compruebe el tamaño del recipiente detectado (detección errónea: deseché el recipiente)
4. Thopaz+ está listo para el control del funcionamiento


## 3. Realización del control del funcionamiento

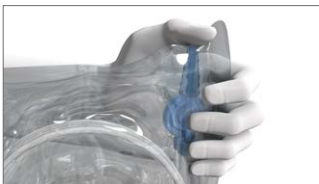

1. Selle el tubo (manténgalo estéril)

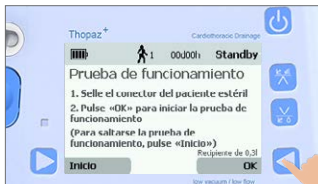

2. Pulse «OK»  
**Comprobación superada:** continúe  
**Comprobación fallida:** siga las instrucciones de uso

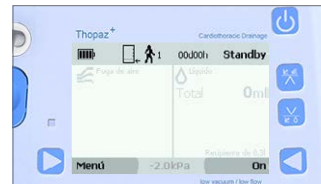

3. Conecte el sistema Thopaz+ al paciente de acuerdo con la normativa hospitalaria
4. Pulse «On» para iniciar la terapia

## 4. Ajuste de presión durante el funcionamiento



1. Pulse simultáneamente



2. Ajuste la presión deseada



3. Confirme con «OK»

## 5. Comprobación del progreso del tratamiento



1. Compruebe el historial de pérdida de aire



2. Desplácese por los gráficos de pérdida de aire pulsando «Siguiente»




3. Compruebe el historial de líquidos




4. Desplácese por los gráficos de líquido pulsando «Siguiente»

## 6. Reinicio del indicador de líquido

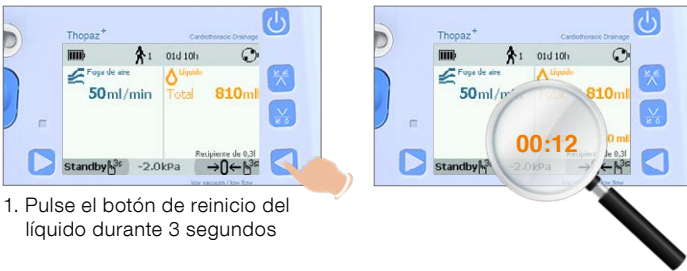


1. Pulse el botón de reinicio del líquido durante 3 segundos
2. El temporizador indica la última vez que el parámetro estuvo a cero. El indicador puede ponerse a cero siempre que sea necesario pulsando el botón del historial de líquidos (durante 3 segundos).

## 7. Sustitución del recipiente

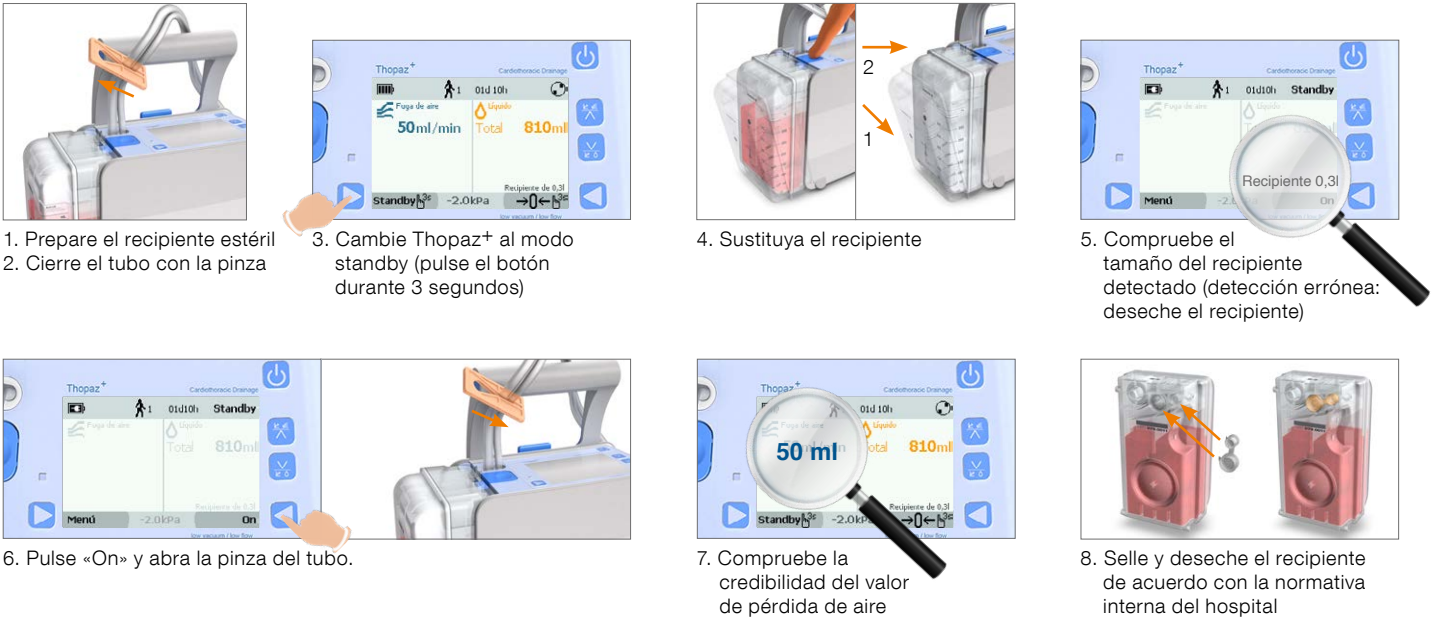

1. Prepare el recipiente estéril
2. Cierre el tubo con la pinza
3. Cambie Thopaz+ al modo standby (pulse el botón durante 3 segundos)
4. Sustituya el recipiente
5. Compruebe el tamaño del recipiente detectado (detección errónea: deseché el recipiente)
6. Pulse «On» y abra la pinza del tubo.
7. Compruebe la credibilidad del valor de pérdida de aire
8. Selle y deseche el recipiente de acuerdo con la normativa interna del hospital

## 8. Señales de información

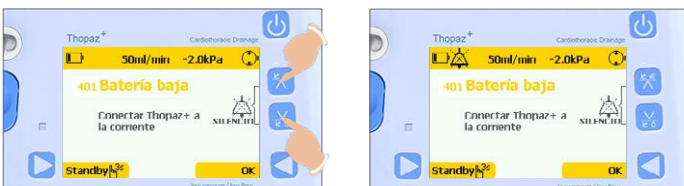

1. Pulse simultáneamente para silenciar la señal de información acústica
2. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla


## 10. Apagado de Thopaz+



1. Cierre el catéter con la pinza
2. Cierre el tubo con la pinza
3. Cambie Thopaz+ al modo standby (pulse el botón durante 3 segundos)
4. Apague Thopaz+
5. Retire y selle el recipiente
6. Deseche el recipiente y el tubo de acuerdo con la normativa interna del hospital
7. Limpie y desinfecte Thopaz+ de acuerdo con las instrucciones de uso

## 9. Comprobación del tubo

 Utilícelo solo con un catéter de paciente (drenaje) en el espacio interpleural.

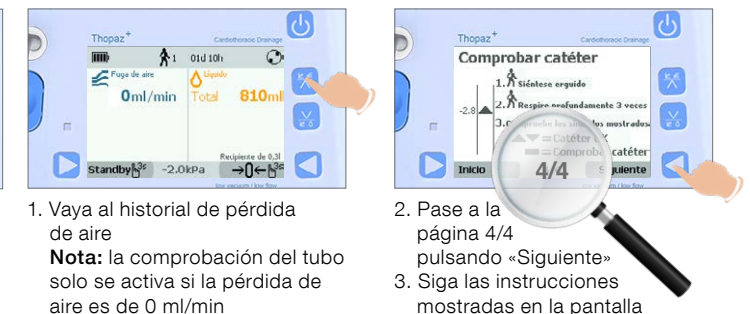

1. Vaya al historial de pérdida de aire  
**Nota:** la comprobación del tubo solo se activa si la pérdida de aire es de 0 ml/min
2. Pase a la página 4/4 pulsando «Siguiente»
3. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla

