

Thopaz+™ Quick Card




Dette Quick Card erstatter ikke den almindelige brugsanvisning. Se brugsanvisningen til Thopaz+ for at få yderligere oplysninger. Dette Quick Card henviser til firmware 1.01.


1. Montering



1. Åbn den sterile slangeindpakning
2. Lad patienttilslutningen være i intern pose

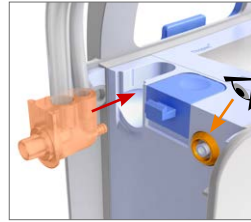

3. Kontrollér, at den orange forsegling er der
4. Fastgør slangen

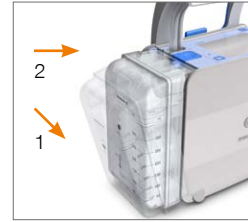


5. Isæt bunden af beholderen først
6. Klik toppen af beholderen på plads




7. Thopaz+ systemet er samlet og klar til at blive tændt

2. Tænd apparatet

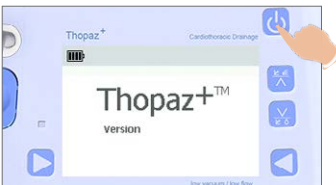


1. Tænd Thopaz+
2. Angiv, om det er en ny patient, der skal tilsluttes

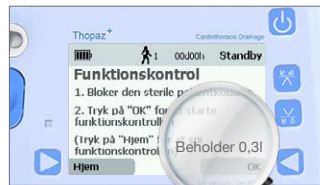

3. Kontrollér den registrerede beholderstørrelse (forkert registrering: bortskaf beholder)
4. Thopaz+ er klar til funktionskontrol


3. Udfør funktionskontrol

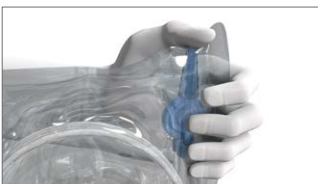

1. Forsegl slangen (hold den steril)



2. Tryk på "OK"
'TEST FULDFØRT': Fortsæt
'TEST MISLYKKET': Følg vejledningen i brugsanvisningen

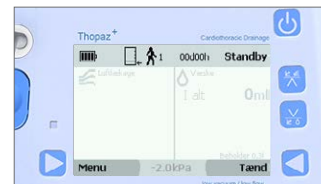

3. Slut Thopaz+ til patienten i henhold til hospitalets retningslinjer
4. Start behandlingen ved at trykke på „Tænd“

4. Justér trykket under drift



1. Tryk samtidig



2. Indstil det ønskede tryk




3. Bekræft med „OK“

5. Kontrollér behandlingsforløb




1. Kontrollér luftlækagehistorik

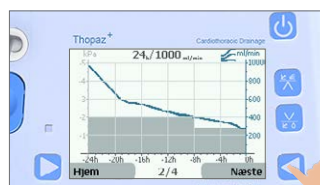

2. Brug knappen „Næste“ til at rulle i luftlækagegrafer



3. Kontrollér væskehistorik

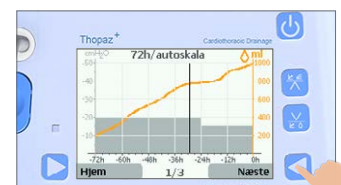


4. Brug knappen „Næste“ til at rulle i væskegrafer

6. Start og nulstil Timer til væskeskema




1. Timeren startes og nulstilles ved tryk på knap i 3 sek.
2. Timeren viser timer: minutter siden sidste nulstilling. Aflæses efter behov og nulstilles derefter, ved tryk på knap i 3 sek.

7. Udskift beholder

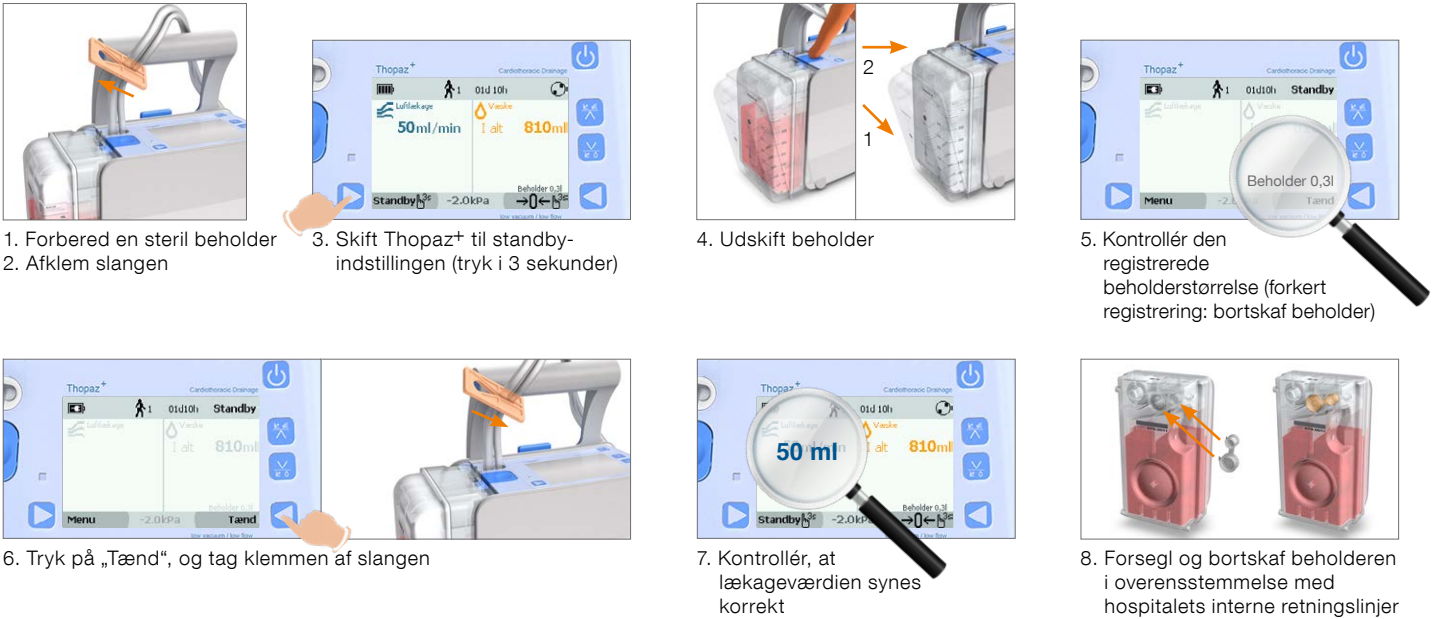


1. Forbered en steril beholder
2. Afklem slangen
3. Skift Thopaz+ til standby-indstillingen (tryk i 3 sekunder)
4. Udskift beholder
5. Kontrollér den registrerede beholderstørrelse (forkert registrering: bortskaf beholder)
6. Tryk på „Tænd“, og tag klemmen af slangen
7. Kontrollér, at lækageværdien synes korrekt
8. Forsegl og bortskaf beholderen i overensstemmelse med hospitalets interne retningslinjer

8. Informationssignaler

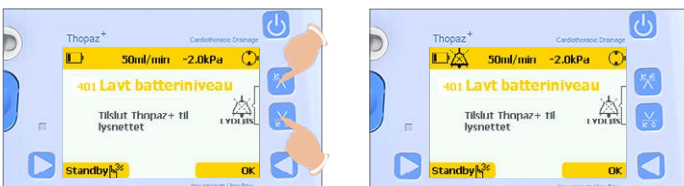

1. Tryk på begge knapper samtidigt, for at kvittere for signalet
2. Følg instruktionerne på skærmen


10. Slukning af Thopaz+

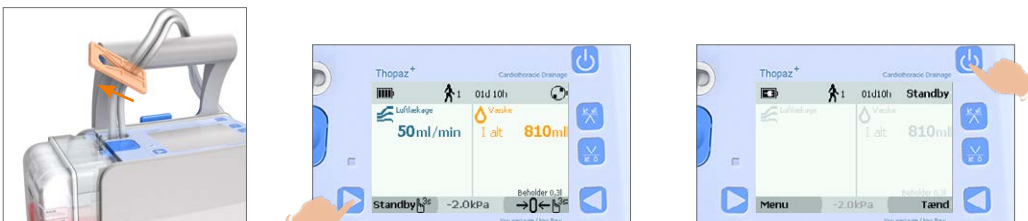

1. Afklem kateter
2. Afklem slangen
3. Skift Thopaz+ til standby-indstillingen (tryk i 3 sekunder)
4. Sluk Thopaz+
5. Aftag og forsegl beholderen
6. Bortskaf beholderen og slangen i overensstemmelse med hospitalets interne retningslinjer.
7. Rengør og desinficér Thopaz+ som beskrevet i brugsanvisningen

9. Kateterkontrol

 Brug kun med et patientkateter (dræn) i det interpleurale rum.

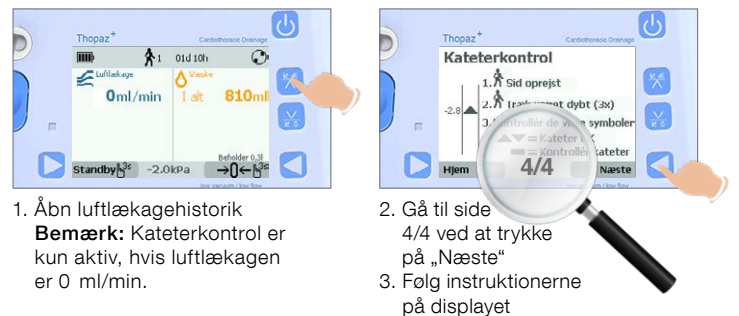

1. Åbn luftlækagehistorik
Bemærk: Kateterkontrol er kun aktiv, hvis luftlækagen er 0 ml/min.
2. Gå til side 4/4 ved at trykke på „Næste“
3. Følg instruktionerne på displayet

