

## Dominant Flex Aspiratore chirurgico

## IT

### ISTRUZIONI PER L'USO

### AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

#### ⚠ AVVERTENZA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può condurre alla morte o a gravi lesioni.

#### ⚠ ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può condurre a lesioni moderate o lievi.

#### 👉 SUGGERIMENTO RELATIVO ALLA SICUREZZA

Indica informazioni utili per l'utilizzo in sicurezza del dispositivo.

Il modello Dominant Flex è approvato esclusivamente per l'utilizzo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Medela può garantire il funzionamento sicuro del sistema solo se Dominant Flex è utilizzato in combinazione con accessori originali Medela (sistema di raccolta, tubi, filtri ecc.; consultare il capitolo "Panoramica degli accessori").

#### NOTA IMPORTANTE

- Leggere e rispettare queste avvertenze e istruzioni di sicurezza prima dell'uso. Prima dell'uso, acquisire familiarità con i segnali informativi associati e le istruzioni per la risoluzione dei problemi (vedere i capitoli "Installazione" e "Risoluzione dei problemi"). Queste istruzioni devono essere conservate per riferimento insieme al dispositivo.
- Le presenti istruzioni per l'uso costituiscono una guida generale per l'impiego del prodotto. Per qualsiasi questione medica rivolgersi a un medico. Il medico è responsabile del rispetto delle procedure e delle tecniche operatorie corrette. Ogni medico deve valutare se il trattamento è adeguato, basandosi sulle proprie conoscenze e sulla propria esperienza. Medela è responsabile esclusivamente per gli effetti sulla sicurezza di base, per l'affidabilità e per le prestazioni di Dominant Flex, purché utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso.
- Il medico è responsabile del rispetto delle procedure e delle tecniche operatorie corrette. Ogni medico deve valutare se il trattamento è adeguato, basandosi sulle proprie conoscenze e sulla propria esperienza.
- Qualsiasi incidente grave che si sia verificato in relazione al dispositivo deve essere segnalato a Medela AG e alla relativa autorità competente.

#### AVVERTENZE

- ⚠ Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziale contaminazione crociata o esposizione a rischi biologici**
- Dopo ogni uso, le parti che sono state a contatto con le secrezioni aspirate devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate o smaltite, secondo le istruzioni per il ricondizionamento.
- I tubi di collegamento forniti con il dispositivo non devono mai entrare a contatto diretto con l'area di aspirazione. Si deve utilizzare sempre un catetere di aspirazione sterile (rischio di infezione).

- ⚠ Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziali lesioni dovute a un uso improprio**
- Esclusivamente per l'uso da parte di persone con formazione medica, adeguatamente addestrate alle procedure di aspirazione e all'uso di aspiratori.
- Consultare le istruzioni per l'uso e tenere conto dei fattori di rischio e delle controindicazioni prima di utilizzare l'aspiratore Dominant Flex. La mancata lettura e l'insosseranza di tutte le istruzioni riportate nel presente manuale prima dell'uso possono comportare lesioni gravi o mortali per il paziente.
- Non idoneo per l'impostazione a basso livello di vuoto, come necessario, ad esempio, per il drenaggio toracico senza accessori specializzati.
- Non omologato per uso esterno o per applicazioni di trasporto.

- ⚠ Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziali lesioni durante la configurazione o l'uso**
- Non sono consentite modifiche di questa apparecchiatura.
- Non collegare il dispositivo a un tubo di drenaggio passivo.
- L'aspiratore Dominant Flex è stato testato in combinazione con gli accessori elencati nella sezione "Panoramica degli accessori".
- Per un uso corretto e sicuro, usare l'aspiratore Dominant Flex soltanto con questi accessori. Ulteriori informazioni sono disponibili nel foglio di istruzioni dei singoli accessori.

- ⚠ Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziali lesioni dovute a interferenze con altri dispositivi**
- Non utilizzare l'aspiratore Dominant Flex in prossimità di altre apparecchiature né sovrapporlo a esse. Se tali condizioni d'uso sono indispensabili, osservare attentamente l'aspiratore Dominant Flex per verificarne il funzionamento normale nella configurazione in cui sarà usato.
- l'uso di accessori o cavi diversi da quelli forniti dal produttore di questo dispositivo può causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questo aspiratore, con conseguente funzionamento improprio.
- dispositivi di comunicazione a radiofrequenza portatili (tra cui periferiche come ad esempio cavi di antenne e antenne esterne) devono essere usati a una distanza minima di 30 cm dall'aspiratore Dominant Flex, compresi i cavi (cavo di alimentazione, interruttore a pedale, carrello) specificati dal produttore. Altrimenti, potrebbe verificarsi una riduzione delle prestazioni di questo apparecchio.
- ⚠ Avvertenza: per ridurre il rischio di scosse elettriche o di esposizione a calore, incendio, esplosione**
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, l'apparecchio deve essere collegato esclusivamente a una presa di rete fissa dotata di sistema di protezione con messa a terra.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato per l'aspirazione di liquidi esplosivi, facilmente infiammabili o corrosivi.
- Prima del ricondizionamento, scollegare il dispositivo dalla presa di rete fissa.
- Scollegare la spina dalla presa di rete prima di sostituire il fusibile.
- L'aspiratore Dominant Flex è alimentato dalla rete elettrica. Prima di collegare l'aspiratore all'alimentazione elettrica, verificare che l'alimentazione elettrica locale corrisponda alla potenza nominale indicata sulla targhetta dei dati tecnici.

#### ATTENZIONE

**⚠ Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziale contaminazione crociata o esposizione a rischi biologici**

- Prima dell'apertura, ispezionare visivamente la confezione sterile del dispositivo per escludere la presenza di danni.
- Non utilizzare i dispositivi con confezione danneggiata.
- I dispositivi riutilizzabili vengono forniti non sterili e devono essere ricondizionati prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo in conformità al capitolo "Linee guida generali per il ricondizionamento".
- Durante il ricondizionamento dei dispositivi, indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti monouso e altri DPI in conformità alle linee guida e alle normative locali.
- Trattamento al punto di utilizzo con acqua di rubinetto (≤40 °C, ≈104 °F). La mancata osservanza di questa precauzione può causare il fissaggio dei residui e pertanto inibire la disinfezione.

**⚠ Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziali lesioni dovute a un uso improprio**

- L'uso improprio può causare dolore e lesioni al paziente.
- Il paziente deve essere monitorato regolarmente in base alle istruzioni del medico o alle linee guida interne dell'ospedale. Le indicazioni oggettive o i segni di una possibile infezione del paziente o di una complicanza (ad esempio febbre, dolore, arrossamento, aumento del calore, gonfiore o fuoriuscite purulente) devono essere osservati immediatamente. La mancata osservanza di tale prescrizione può comportare situazioni di pericolo per il paziente. Monitorare con frequenza lo stato di funzionamento dell'aspiratore Dominant Flex.
- Quando l'aspiratore Dominant Flex viene utilizzato per il drenaggio delle ferite, la pressione negativa deve essere impostata secondo le istruzioni dello specialista e non deve causare danni alla ferita.

**⚠ Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziali lesioni durante la configurazione o l'uso**

- La versione per carrello necessita di una distanza minima di 5 cm dall'involucro per evitare il surriscaldamento del dispositivo.

**⚠ Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziali lesioni dovute a interferenze con altri dispositivi**

- Le apparecchiature di comunicazione wireless, come dispositivi di rete domestica wireless, telefoni cellulari, cordless e relative stazioni base e ricetrasmittitori palmari, possono influenzare il funzionamento dell'aspiratore Dominant Flex e devono essere mantenute a una distanza di almeno 30 cm dall'apparecchiatura (aspiratore, cavo di alimentazione, interruttore a pedale, carrello).

**⚠ Attenzione: per ridurre il rischio di scosse elettriche o di esposizione a calore, incendio, esplosione**

- Per evitare il surriscaldamento del dispositivo, lo scarico posto sul fondo dell'aspiratore non deve risultare ostruito quando l'aspiratore è in funzione.

#### 👉 SUGGERIMENTO RELATIVO ALLA SICUREZZA

- Per quanto concerne i test di sicurezza, l'aspiratore deve essere sottoposto a manutenzione e riparazione per tutto la durata utile in conformità con il manuale di assistenza.
- La protezione dell'aspiratore Dominant Flex contro gli effetti di scarica di un defibrillatore cardiaco dipende dall'impiego dei cavi appropriati.
- La separazione del dispositivo dalla rete elettrica è garantita solo tramite l'interruzione del collegamento tra la spina e la presa di rete fissa.
- Dispositivi di interfaccia di terzi (ad es. cannule, cateteri) devono poter essere collegati senza influire sulle prestazioni dell'aspiratore.
- Assicurarsi che l'aspiratore funzioni correttamente prima dell'uso; vedere la sezione sulla preparazione per l'uso.
- Evitare il contatto dei fluidi con le estremità della presa di rete o con l'attacco di ingresso di alimentazione.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Consultare le istruzioni per l'uso dei dispositivi da utilizzare con Dominant Flex per eventuali controindicazioni nelle specifiche indicazioni per l'uso.
- Per qualsiasi uso dell'aspiratore, indossare sempre i guanti.
- Dominant Flex è un dispositivo medicale che richiede speciali misure di sicurezza con riguardo alla compatibilità elettromagnetica. Deve essere installato e messo in funzione in conformità a quanto riportato dalle informazioni EMC nel capitolo "Documentazione tecnica".
- L'aspiratore Dominant Flex non è idoneo per la risonanza magnetica (RM). Non introdurre l'aspiratore nell'ambiente RM.
- In caso di traboccamento, informare immediatamente il servizio tecnico interno ed eseguire le operazioni descritte nel manuale di assistenza.
- In ognuno dei seguenti casi, il dispositivo non deve essere utilizzato e deve essere riparato dal servizio di assistenza clienti Medela:
  - il cavo di alimentazione elettrica o la spina sono danneggiati;
  - il dispositivo non funziona perfettamente;
  - il dispositivo è danneggiato;
  - il dispositivo presenta difetti evidenti legati alla sua sicurezza.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
- La presa di rete deve essere tenuta lontano dall'umidità.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione per estrarre la spina dalla presa di rete!
- Non lasciare mai incustodito il dispositivo quando è acceso.
- Durante l'uso l'aspiratore deve trovarsi in posizione verticale.
- Non utilizzare mai il dispositivo in presenza di elevata temperatura ambiente, quando si è molto stanchi o in un ambiente a rischio di esplosione.
- Non mettere mai il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Quando si usano prodotti sterili monouso, tenere presente che non sono destinati al ricondizionamento. Il ricondizionamento può provocare la perdita di caratteristiche meccaniche, chimiche e/o biologiche. Il riuso può causare contaminazione incrociata.
- Contattare il rappresentante locale del servizio di assistenza clienti Medela per ricevere assistenza sull'uso del prodotto.
- Utilizzare l'apparecchiatura di aspirazione Medela esclusivamente per la rimozione dei fluidi corporei. Non utilizzare apparecchiature di aspirazione Medela per la somministrazione di fluidi corporei.

- Contattare il rappresentante locale del servizio di assistenza clienti Medela per ricevere assistenza sull'uso del prodotto.
- Utilizzare l'apparecchiatura di aspirazione Medela esclusivamente per la rimozione dei fluidi corporei. Non utilizzare apparecchiature di aspirazione Medela per la somministrazione di fluidi corporei.

Tenere le istruzioni per l'uso a portata di mano per una futura consultazione.

### DESCRIZIONE

#### Introduzione

Dominant Flex è un aspiratore di alta qualità che offre massime prestazioni per molteplici esigenze di aspirazione. La possibilità offerta dall'aspiratore Dominant Flex di selezionare tre diverse portate assicura flessibilità a seconda delle preferenze del chirurgo. Associa in modo ideale la facilità d'uso e di ricondizionamento con caratteristiche di sicurezza per garantire un funzionamento ottimale. La vasta scelta di accessori proposta da Medela consente di configurare l'aspiratore per le più diverse applicazioni medicali.

#### Uso previsto

L'uso previsto dell'aspiratore Dominant Flex è la produzione di un vuoto costante nell'intervallo da 0 a –95 kPa.

#### Indicazioni d'uso

L'aspiratore Dominant Flex è indicato per tutte le applicazioni che richiedono vuoto, come chirurgia generale, liposuzione, endoscopia, ablazione epicardica, aspirazione nasofaringea, neurochirurgia, OPCAB, parto cesareo/assistito con vuoto e drenaggio delle ferite in ospedali, cliniche e studi medici.

#### Controindicazioni

Non vi sono controindicazioni note per l'aspiratore Dominant Flex.

#### Utente destinatario

L'aspiratore Dominant Flex deve essere utilizzato esclusivamente da operatori sanitari che abbiano familiarità con le procedure di aspirazione e dal personale dedicato al ricondizionamento. L'operatore non deve essere affetto da problemi di udito né da sordità e deve possedere una sufficiente facoltà visiva.

#### Categoria di pazienti destinatari

L'aspiratore Dominant Flex è destinato solo all'uso su pazienti che presentano esclusivamente le condizioni descritte nelle indicazioni per l'uso.

#### Effetti collaterali indesiderati

Non sono noti effetti collaterali associati all'aspiratore Dominant Flex.

## PANORAMICA

#### Definizione di vuoto

Durante l'applicazione di dispositivi medici di aspirazione, il vuoto viene creato generalmente per differenza (in cifre assolute) tra la pressione assoluta e la pressione atmosferica o come valori negativi in chilopascal (kPa). Nel presente documento l'indicazione di –10 kPa, ad esempio, è sempre riferita a un intervallo di pressione in kPa al di sotto della pressione atmosferica nell'ambiente (secondo i termini e le definizioni della norma EN ISO 10079:1999).



#### Versioni e componenti principali dell'aspiratore

- Vacuometro
- Regolatore del vuoto
- Carrello mobile (accessorio opzionale)
- Sistema di sicurezza
- Pulsanti per la variazione del flusso
- Pulsante ON/OFF
- Barra normalizzata
- Tutte le rotelle con dispositivo di blocco
- Interruttore ON/OFF a pedale (carrello)


#### Versione mobile



#### Versione portatile

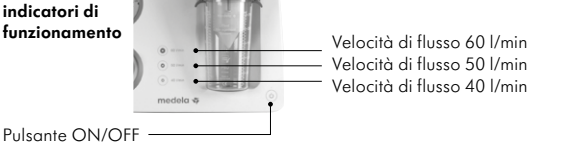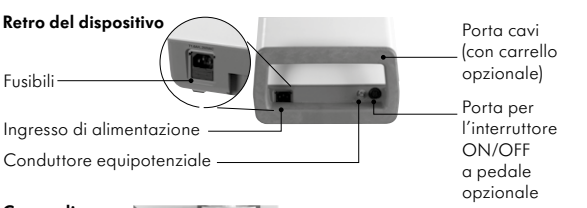


Luce verde: aspiratore acceso.
Luce gialla: errore dell'aspiratore. Consultare il capitolo "Risoluzione dei problemi"
Luce bianca: aspiratore in funzione.

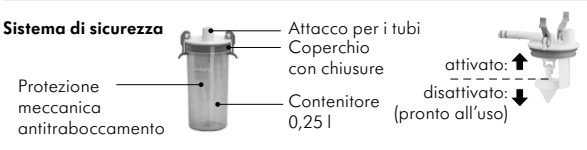

### INSTALLAZIONE

#### 1 Verifica iniziale alla consegna

Verificare la completezza e le condizioni generali del contenuto della confezione Dominant Flex.

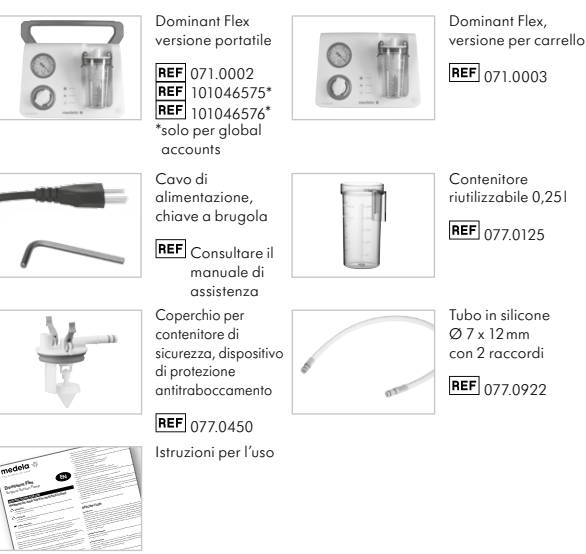


#### 2 Rimozione del blocco per il trasporto

- Rimuovere il foglietto rosso.
- Rimuovere le 3 viti e conservarle per usi futuri.




#### 3 Configurazione della versione mobile (se disponibile)

- Posizionare la parte superiore del carrello sulla parte inferiore, accertandosi che il tubo si inserisca come illustrato.
- Collegare i componenti con 4 viti.

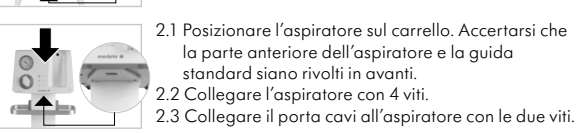

#### 4 Montaggio del morsetto in plastica opzionale (quando si utilizza il carrello opzionale)

- Tenere premuta la manopola azzurra di rilascio.
- Collegare il morsetto in plastica alla guida standard rilasciando la manopola azzurra.

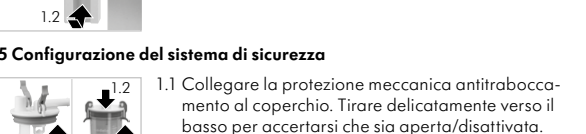

#### 5 Configurazione del sistema di sicurezza

- Collegare la protezione meccanica antiraboccamento al coperchio. Tirare delicatamente verso il basso per accertarsi che sia aperta/disattivata.
- Porre il coperchio sul contenitore.
- Fissare il coperchio mediante le due chiusure.

- Collegare il sistema di sicurezza all'aspiratore.

### PREPARAZIONE PER L'UTILIZZO

#### ⚠ AVVERTENZE

• Esclusivamente per l'uso da parte di persone con formazione medica, adeguatamente addestrate alle procedure di aspirazione e all'uso di aspiratori.

#### Nota

- Per qualsiasi uso dell'aspiratore, indossare sempre i guanti.

#### ⚠ ATTENZIONE

- Durante l'uso, l'aspiratore Dominant Flex deve essere in posizione verticale.
- La versione per carrello richiede una distanza minima di 5 cm dall'involucro per evitare il surriscaldamento del dispositivo. La parte posteriore del contenitore deve essere aperta.
- Verificare l'integrità della confezione degli accessori sterili prima di utilizzarli.

#### 1 Verifiche prima dell'utilizzo

- Prima dell'uso, verificare il sistema Dominant Flex per individuare eventuali danni al cavo o alla spina di alimentazione, danni evidenti al dispositivo o difetti che ne compromettano la sicurezza e il corretto funzionamento.
- Verificare la completezza e le condizioni generali della confezione dell'aspiratore Dominant Flex.
- Verificare tutti gli accessori prima dell'utilizzo:
  - contenitori di aspirazione, coperchi e sacche, per escludere rotture, punti fragili e difetti. Sostituirli se necessario.
  - Tubi, per individuare rotture e punti fragili; verificare che i connettori siano collegati saldamente. Sostituirli se necessario.
  - Come test di sicurezza supplementare, portare il sistema (contenitori inclusi) al massimo del vuoto prima dell'utilizzo effettivo.


#### 2 Montaggio della configurazione di base

- Accertarsi che il sistema di sicurezza sia collegato all'aspiratore Dominant Flex. Vedere i capitoli "Installazione" e "Impostazione del sistema di sicurezza".

- Se necessario, collegare un filtro al sistema di sicurezza, con la freccia rivolta verso la direzione del flusso.
- Collegare tutti gli accessori necessari in funzione delle esigenze. Vedere "Panoramica degli accessori".

#### 3 Montaggio dell'interruttore a pedale opzionale

- Collegare l'interruttore a pedale opzionale all'aspiratore, inserendo il connettore.
- Verificare il corretto funzionamento dell'interruttore a pedale.

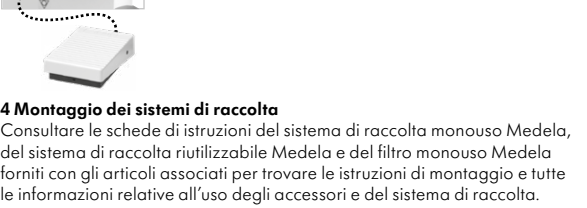

#### 4 Montaggio dei sistemi di raccolta

Consultare le schede di istruzioni del sistema di raccolta monouso Medela, del sistema di raccolta riutilizzabile Medela e del filtro monouso Medela forniti con gli articoli associati per trovare le istruzioni di montaggio e tutte le informazioni relative all'uso degli accessori e del sistema di raccolta.

### ISTRUZIONI PER LA MESSA IN FUNZIONE

#### ⚠ AVVERTENZA

- L'aspiratore Dominant Flex è alimentato dalla rete elettrica. Prima di collegare l'aspiratore all'alimentazione elettrica, verificare che l'alimentazione elettrica locale corrisponda alla potenza nominale indicata sulla targhetta dei dati tecnici.

#### Nota

- L'aspiratore Dominant Flex deve essere configurato in modo che la separazione dall'alimentazione di rete risulti semplice.
- Per qualsiasi uso dell'aspiratore, indossare sempre i guanti.

#### 1 Collegare Dominant Flex all'alimentazione elettrica


- Verificare l'aspiratore prima dell'uso seguendo le istruzioni nel capitolo "Preparazione prima dell'uso".
- Collegare il cavo di alimentazione all'apposito ingresso situato sul retro dell'aspiratore. Utilizzare la staffa di montaggio per fissare il cavo nell'attacco di ingresso.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di rete fissa.
- Viene eseguito un test interno di autodiagnosi. Quando il LED verde si accende, il dispositivo è pronto all'uso.



#### 2 Selezionare il vuoto massimo

- Accendere l'aspiratore Dominant Flex. L'aspiratore indica una velocità di flusso di 50 l/min.

- Ruotare il regolatore del vuoto verso destra per impostare il vuoto al massimo.

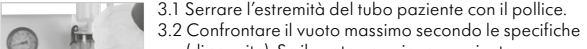


- Serrare l'estremità del tubo paziente con il pollice.
- Confrontare il vuoto massimo secondo le specifiche (di seguito). Se il vuoto non viene raggiunto, consultare i capitoli "Risoluzione dei problemi" e "Vuoto insufficiente".

<b>Specifiche del vuoto:</b>	<b>Vuoto massimo:</b>	
+ 3000 m	– 64 kPa	
	– 480 mmHg	
+ 2000 m	– 74 kPa	
	– 555 mmHg	
+1000 m	–84 kPa	
	–630 mmHg	
+500 m	–89 kPa	
	–668 mmHg	
0 m	–95 kPa	
	–713 mmHg	(Tolleranza: +/-15%)

#### ⚠ ATTENZIONE

- Quando l'aspiratore Dominant Flex viene utilizzato per il drenaggio delle ferite, la pressione negativa deve essere impostata secondo le istruzioni dello specialista e non deve causare danni alla ferita.

#### 3. Variazione della velocità di flusso

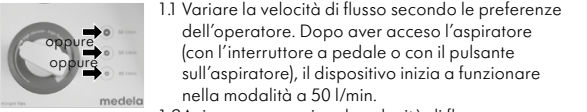

- 1.1 Variare la velocità di flusso secondo le preferenze dell'operatore. Dopo aver acceso l'aspiratore (con l'interruttore a pedale o con il pulsante sull'aspiratore), il dispositivo inizia a funzionare nella modalità a 50 l/min.
- 1.2Azione per variare la velocità di flusso a:
  - 60 l/min
  - 50 l/min
  - 40 l/min

#### 4 Modifica del livello di vuoto

- 2.1 Fissare il tubicino paziente con il morsetto.
- 2.2 Ruotare il regolatore del vuoto per selezionare il vuoto corretto a seconda dell'applicazione specifica. Per aumentare il vuoto, ruotare il regolatore in senso orario.
- 2.3 Verificare l'impostazione con il vacuometro.

#### ⚠ AVVERTENZA

- Dopo ogni uso, le parti che sono state a contatto con le secrezioni aspirate devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate o smaltite, secondo le istruzioni per il ricondizionamento.

#### ⚠ ATTENZIONE

- I dispositivi riutilizzabili vengono forniti non sterili e devono essere ricondizionati prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo in conformità al capitolo "Linee guida generali per il ricondizionamento".

#### 5 Spegnimento dopo l'utilizzo

- 1.1 Premere il pulsante ON/OFF per spegnere l'aspiratore.




- 2.1 Scollegare la spina dalla presa di rete.
3. Pulire e disinfettare l'aspiratore Dominant Flex. Vedere il capitolo "Linee guida generali per il ricondizionamento".


### CONFIGURAZIONE PER PARTO ASSISTITO CON VUOTO

#### Nota

- L'aspiratore Dominant Flex deve essere configurato in modo da facilitarne la separazione dalla rete elettrica.

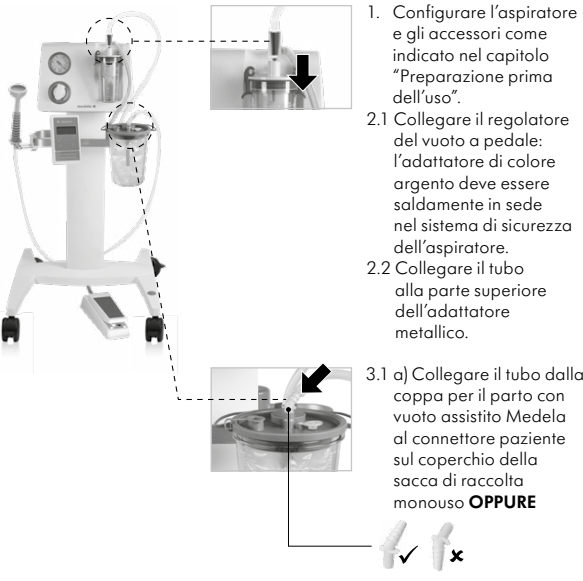

1. Configurare l'aspiratore e gli accessori come indicato nel capitolo "Preparazione prima dell'uso".
2. Collegare il regolatore del vuoto a pedale: l'adattatore di colore argento deve essere saldamente in sede nel sistema di sicurezza dell'aspiratore.
- 2.2 Collegare il tubo alla parte superiore dell'adattatore metallico.
- 3.1 a) Collegare il tubo dalla coppa per il parto con vuoto assistito Medela al connettore paziente sul coperchio della sacca di raccolta monouso **OPPURE**

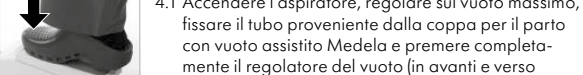

- 4.1 Accendere l'aspiratore, regolare sul vuoto massimo, fissare il tubo proveniente dalla coppa per il parto con vuoto assistito Medela (premere completamente il regolatore del vuoto (in avanti e verso il basso, usando l'avampiede).
- 4.2 Confrontare il vuoto massimo in base alle specifiche, vedere la tabella sopra.

- 5.1 Se OK, rilasciare il vuoto riportando il regolatore del vuoto a pedale alla posizione di riposo "pressione ambiente o vuoto zero" (indietro e verso il basso, usando il tallone).
- 5.2 L'aspiratore è ora pronto per l'utilizzo.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

#### Vuoto insufficiente

Verificare che:

- il regolatore del vuoto sia impostato correttamente;
- i tubi non siano difettosi o rotti. Se necessario, sostituirli;
- tutti i collegamenti siano ben serrati;
- la protezione antiraboccamento sia disattivata/aperta. Se la protezione antiraboccamento è attivata, disattivarla come mostrato nei capitoli "Installazione" e "Impostazione del sistema di sicurezza";
- il contenitore di aspirazione e il coperchio non presentino rotture, zone fragili, scoloriture. Se necessario, sostituirli;
- il sistema monouso non presenti rotture, zone fragili, scoloriture. Se necessario, sostituirli;
- il filtro non sia ostruito. Per verificare se il filtro è ostruito, fare riferimento alla scheda di istruzioni fornita con i filtri.

Se il problema non può essere risolto, contattare il reparto tecnico interno.

#### Nessun LED acceso

L'aspiratore Dominant Flex non è collegato alla rete elettrica oppure occorre sostituire il fusibile.

#### Indicatore a LED giallo acceso

- Caso di minore gravità:** l'indicatore a LED giallo è acceso, ma l'aspiratore può essere acceso e spento:
- contattare il reparto tecnico interno o il centro di assistenza autorizzato alla prima occasione.

- Caso di maggiore gravità:** l'indicatore a LED giallo è acceso e l'aspiratore non può essere acceso e spento:
- contattare il reparto tecnico interno o il centro di assistenza autorizzato per riparazioni/manutenzione.

#### Il motore non funziona

Verificare che:

- l'aspiratore Dominant Flex sia acceso. Il LED di standby deve essere acceso;
- la spina di alimentazione sia inserita correttamente nella presa di rete fissa e nell'apposito ingresso sull'apparecchio;
- il fusibile sul retro dell'aspiratore Dominant Flex non sia difettoso. Per sostituire il fusibile difettoso, seguire il capitolo "Sostituzione di un fusibile difettoso".

Se il problema non può essere risolto, contattare il reparto tecnico interno.

